

Hej

Måste få berätta om det som händer på Norrköpings AK-mottagning. Där finns ett härligt gäng som sedan en tid tillbaka använder provtagningsutrustningen Simple Simon PT från Zafena tillsammans med Journalias AVK. Se bifogade filer för hur det kan se ut på arbetsplatsen.

De är mycket nöjda över de nya rutinerna. Patientsäkerheten har ökat då de inte längre för in provresultatet manuellt. Och tillgången till Journalias AVK direkt vid provtagningsstillfället höjer kvaliteten på samtalet kring Warandoseringen. Så här fungerar det:

* Patienten kommer in till mottagningsrummet och personalen tar provet. ** Patienten tas fram i Journalias AVK, via streckkod på PK-kontrollbrevet. *** Medan provet analyseras av Simple Simon PT, vilket tar ca 1 minut, kan patienten se kurvan växa fram och samtidigt berätta om övrig medicinering, koständringar och eventuella blödningar, vilket registreras "bakom knapparna" i Journalias AVK. När INR-värdet är färdiganalyserat hämtas det in till Journalias AVK via "Dos"-knappen. **** Dosen bestäms, brevet skrivs ut och patienten lämnar mottagningsrummet med PK-kontroll-brevet i sin hand.

Med dessa nya rutiner har också tidsåtgången minskat betydligt, för både patient och personal. Mycket tack vare att allt görs i en följd med patienten kvar i rummet.

Vill ni veta mera kan ni kontakta Zafena, som utvecklar och säljer Simple Simon PT, tel. +46 141-40520, info@zafena.se, eller, förstås, kontakta oss på Journalia, tel. +46 554-22231

Med vänliga hälsningar, Anna Rameback, Journalia AB, anna.rameback@journalia.se



