


Approved by:	Version: 20220311
Date:	Author: FW
	Page 1 by 2

Abaxis Vetscan H5 Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker med USB2.0, USB Type A till USB type B.

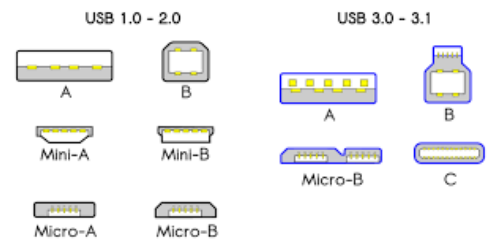

Intrument-tag: LMC-AVH1

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.
Följ sedan dokumentationen "Snabbguide - Arbetsflöde" för att utföra analys och skicka in resultat till journalsystemet.




Inställningar på instrument

1. Välj "Settings"
(Den lilla handen nere till höger)



2. Välj "Communication"

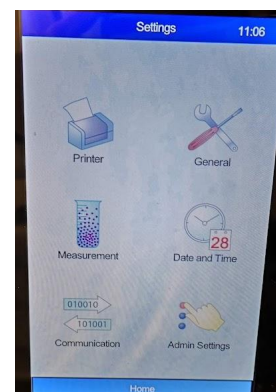

Approved by:	Version: 20220311
Date:	Author: FW Page 2 by 2

3. Välj "Serial USB Communication"



4. Se till att:
Serial USB Link = Enabled
Serial Link Baud Rate = 9600
Serial Automatic Send = Enabled

Klart.

