


Approved by: XR	Version: 20241025	
Date: 20241025	Author: NKR	Page 1 by 2

Abaxis Vetscan VS2 Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker med USB2.0, USB Type A till USB type B.

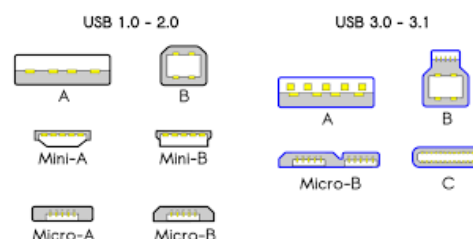



Instrument-tag: LMC-AVS2

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet. Följ sedan dokumentationen "Snabbguide - Arbetsflöde" för att utföra analys och skicka in resultat till journalsystemet.



Inställningar på instrument

1. Välj "Settings"
(Den lilla handen nere till höger)
2. Gå vidare i settings till nästa sida genom att trycka på den lilla handen nere till höger en gång till.

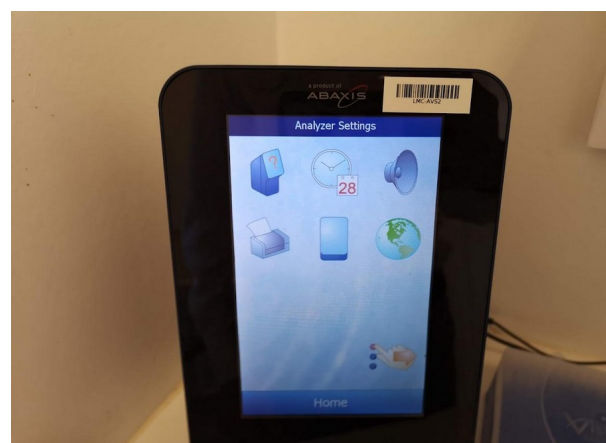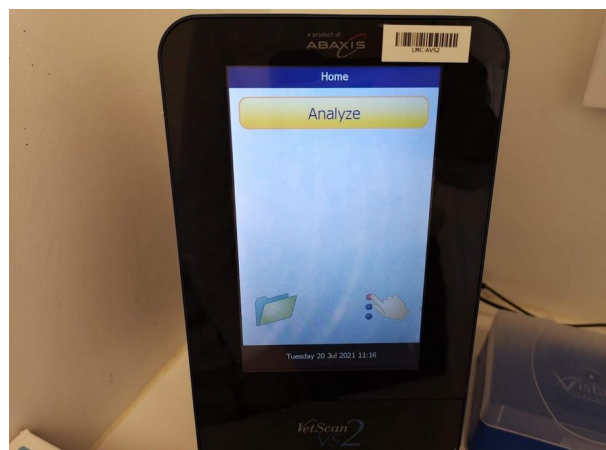


Approved by: XR	Version: 20241025
Date: 20241025	Author: NKR

Page 2 by 2

3. Tryck på bilden med en liten VS2 som har en vit pil med "1001110"



4. Välj alternativ "ASTM 1394-97"

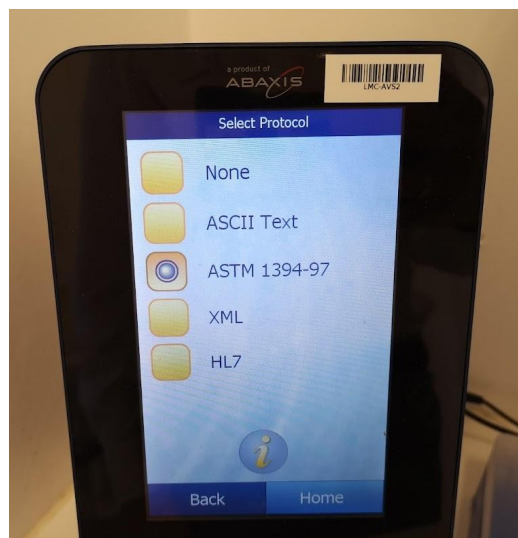

5. Tryck sedan på texten "ASTM 1394-97"
Välj alternativet "USB (serial)"
Tryck sedan på "Home"

