

Afinion 2 Instrument-tag

Abbott Afinion 2 Instrument-tag

Dokumentet beskriver hvilken instrument-tag måleren skal merkes med for å fungere med Zafena Workstation. Oppkoblingen skjer med Nettverkskabel (ZAF 509) direkt till det lokale nettverket. Muligens kan det behøves en mindre nettverksswitch(ZAF-520-15) om det ikke er tilstrekkelig med nettverks uttak i lokalet.

Instrument-tag: LMC-AAF2

Fest instrument-taggen på eller ved instrumentet.
Dersom det finnes flere enn bare en Affinion som skal kobles opp så må Zafena ha deres serienr og lage spesial tag til hver enkelt.



Nettverksinnstillinger

Start Zafena Workstation och vent til at nettverksikonen er svart, uten varsel symboler.




Koble til nettverksadaptren [ZAF-520-14], fra Zafena, till ett av USB-kontaktene i Zafena Workstation.



Instillinger på instrument

1. Velg "Settings"
(Knappen lengst ned, tredje alternativet)

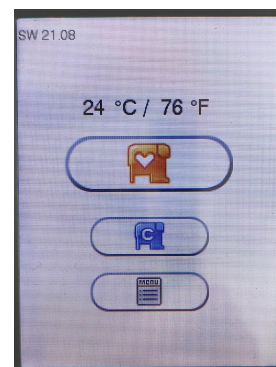

2. Trykk på den lille skiftenøkkelen
(Tredje alternativet)

