

Bionote VCheck Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker med nätverkskabel som ansluts från instrumentet till en nätverk-USB adapter som är ansluten till POC-Workstation.

Delar som behövs:

Produkt	Produktnummer
- POC-Workstation	ZAF-552
- 1x Nätverkskabel	ZAF-509
- Ethernet till USB nätverksadapter	ZAF-520-14

Instrument-tag: LMC-BVV1

Skriv ut, klipp ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.



Nätverksinställningar



Starta POC-Workstation och vänta till dess att nätverksikonen är svart, utan varningssymboler.

Anslut nätverksadaptern [ZAF-520-14], från Zafena, till ett av USB-kontakterna.




Anslut nätverkskabeln mellan VCheck och nätverksadaptern.

OBS: Är mer än 2 instrument anslutna till POC-Workstation via USB port behövs en extra strömförsörjd USB-hub ZAF-520-16. USB-huben behövs för att Nätverksadaptern använder mycket ström vilket kan påverka anslutningen till de andra USB-anslutna instrumenten.

Inställningar på instrument


1. Välj "Supervisor"

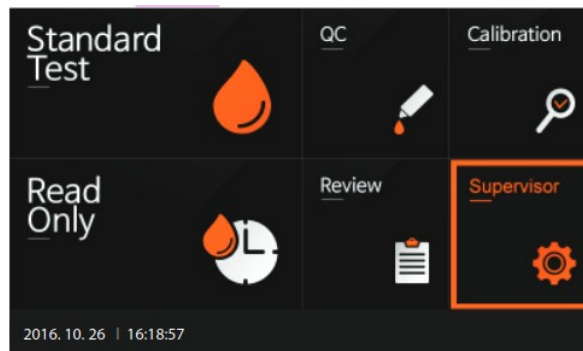


2. Skriv in lösenord och
Tryck på Enter
(0000, fyra nollor)




3. Välj "Setting"

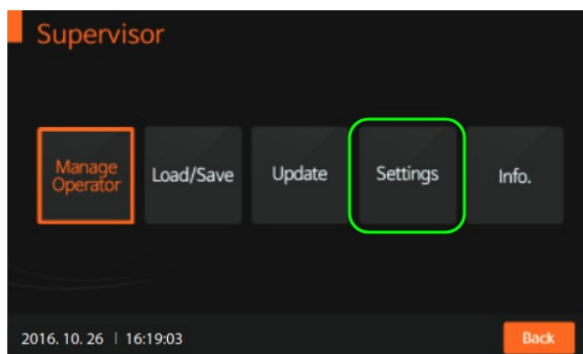

4. Välj "General settings"

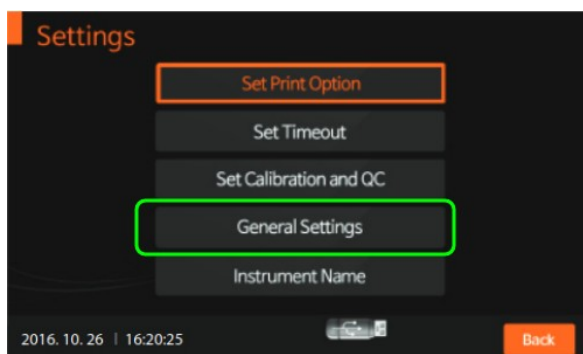

5. Välj "Network"

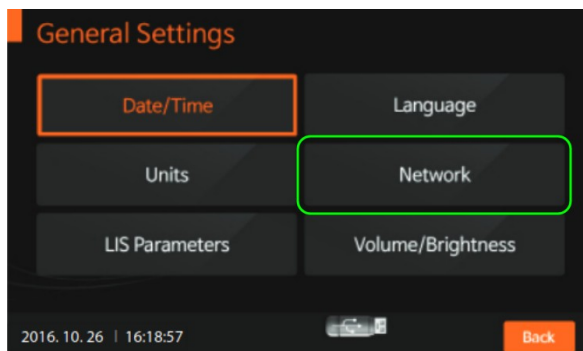

6. Klicka i Wired


Välj Server/Client: Client

Välj Protocol: HL7(B)

Tryck sedan på SET



7. Välj "LIS Parameters"

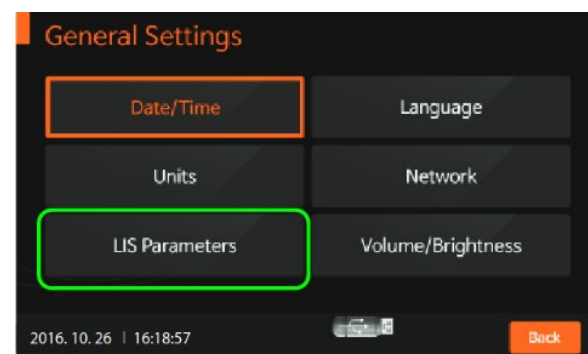

8. Skriv in IP-address:

172.16.1.1

Skriv in Port number:

5005

Ställ Auto Send till:

On

Tryck sedan på SET

