

Approved by:	Version: 20210915
Date:	Author: FW

Att installera SpotChem 4430 till POC-Workstation (Med blå kabel)

Dokumentet beskriver hur du som operatör kopplar in SpotChem 4430 till Zafena POC-Workstation för vidare anslutning mot journalsystemet.

Produkter

Zafena POC-Workstation
Arkray SpotChem EZ 4430
Arkray special kommunikationskabel

Tillvägagångssätt

1. Packa upp specialkabel och anslut den till SpotChem 4430. På baksidan finns ett uttag där kabeln passar. Vid anslutning ska du höra ett litet klick när du för in kabeln hela vägen.
2. Anslut USB kontakten till en ledig USB-kontakt i POC-Workstation. Du hittar USB-kontakterna på vänstra sidan av POC-Workstation.
3. Kontrollera att SpotChem 4430 har en instrument-tag (klistermärke med streckkod) fäst, synligt på instrumentet. "LMC-ASE3"



Approved by:	Version: 20210915
Date:	Author: FW

OBS! För kliniker som har svag eller dålig kontakt med internet i sitt labb eller en äldre version av mjukvara i POC-Workstation, krävs ett byte av Micro SD kort. Om ni har fått ett Micro SD kort med försändelsen, anser vi att kortbyte är nödvändigt. I dessa fall utgår punkt 4.

Kontakta Zafena för vägledning.

4. Uppdatera mjukvaran i Zafena POC-Workstation genom att läsa av nedan streckkod med streckkodsläsaren som är ansluten till POC-Workstation. Det är viktigt att nätverkskommunikationen är fullt fungerande för en uppdatering via internet.



5. Testa överföring genom att skanna streckkoden på SpotChem 4430. Välj sedan "Submeny" (tryck 2 på SpotChem), sedan "Resultat" (tryck 1), sedan "Send" (tryck 2) och till slut "Latest" (senaste körningen. Tryck 1). Överföringen startar och presenteras på POC-Workstation.
6. Starta om POC-Workstation genom att skanna nedan streckkod.

