


Sjekk nettverksikonet, dato og klokkeslett er riktig.



Åpne pasientens journal og velg Lab-fanen.

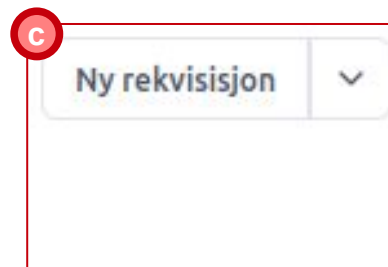

Klikk på knappen "Ny rekvisisjon"




Velg arbeidsstasjon hvor analysen skal utføres i listen.



Laboratorie-ID (LID) skrives ut på den valgte arbeidsstasjonen.




Bruk arbeidsstasjonens strekkodeleser og skann strekkoden på instrumentet for å utføre analysen.

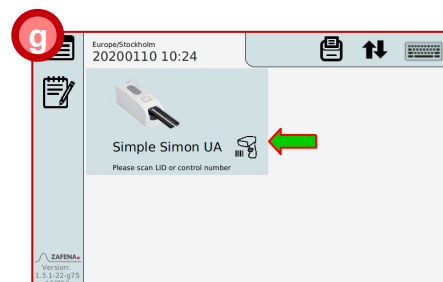

Arbeidsstasjonen viser et bilde av det valgte instrumentet og ber om registrering av LID.



Skann LID som er skrevet ut på arbeidsstasjonen. Pass på at det er riktig pasientnavn.

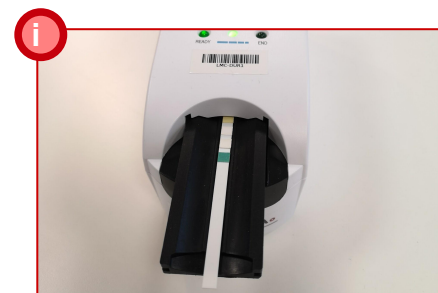


Utfør analyse på valgt instrument i henhold til produsentens instruksjoner.

ENHET	16. NOV.
mmol/L	5,7
g/L	15,0
	15,0

Journalssystemet oppdateres automatisk når nye analyseresultater leveres.




Koble til strøm og nettverkskabel, og start arbeidsstasjonen. Sjekk nettverksikonet, og at klokken går riktig, noe som betyr at du har kontakt med internett.

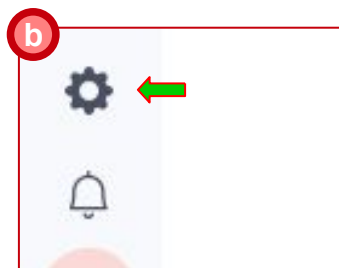


Åpne PatientSky og klikk på tannhjulet nederst til venstre.




Velg menyen "Enhetsadministrasjon" nederst på listen.

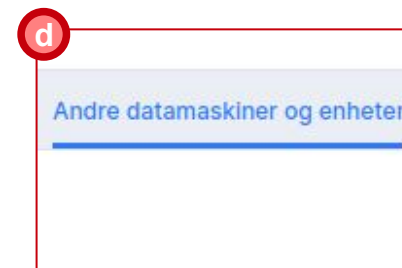

I Integrations-menyen velger du "Andre datamaskiner og enheter"

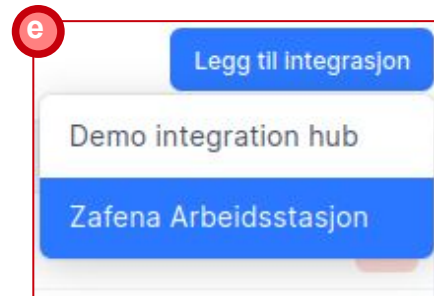

Klikk på "Legg til integrasjon"-knappen og velg "Zafena Arbeidsstasjon"

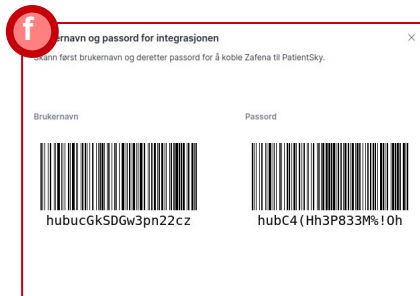


Bruk arbeidsstasjonens strekkodeskanner og skann de to strekkodene som vises i Patientsky.



1 - 5 minutter

Tilkoblingstiden kan variere avhengig av belastningen på servere og nettverk.

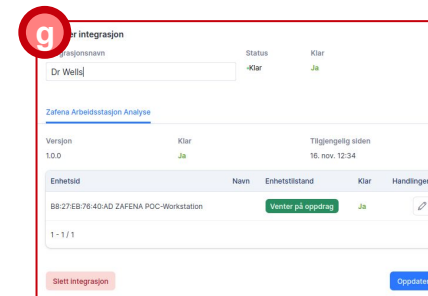

Integrasjonen er fullført når "Rediger integrasjon" vises. Gi arbeidsstasjonen et navn i "Integrasjonsnavn"-boksen og trykk deretter på "Oppdater"-knappen



Listen viser tilkoblede arbeidsstasjoner og tilgjengelighet.