



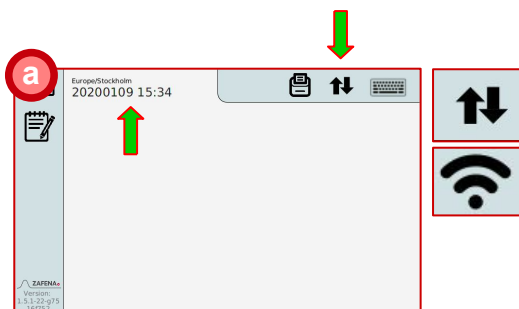


Kontrollera nätverksikonen, samt datum och tid är rätt.



Skapa en ny journalanteckning i LINK.

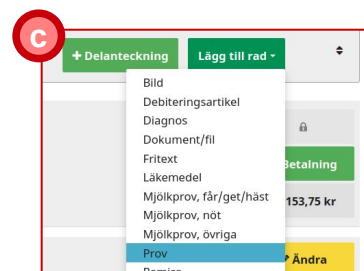

Lägg till rad: Prov

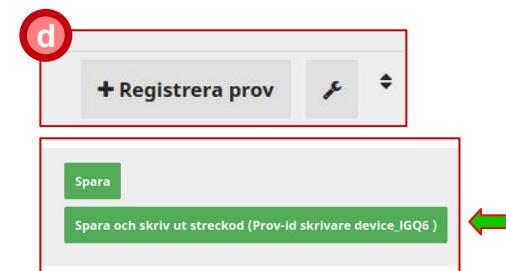


Registrera prov. Klicka sedan på "Spara och skriv ut.."



Laboratorie-ID (LID) skrivs ut på arbetsstationen i labbet.




Använd arbetsstationens streckodsläsare och skanna streckkoden på instrumentet som kan utföra förvald analys.

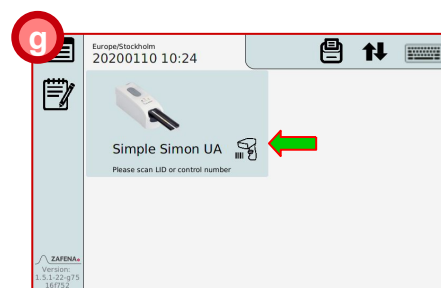


Arbetsstationens display visar valt instrument och begär registrering av LID för vald analys.




Skanna LID som finns utskrivet vid arbetsstationen.

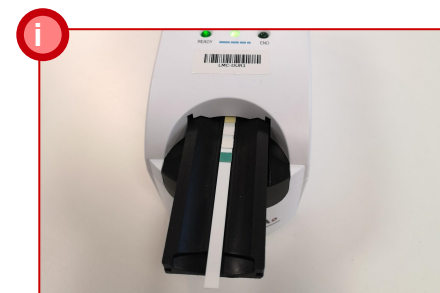

Utför analys enligt tillverkarens instruktioner.

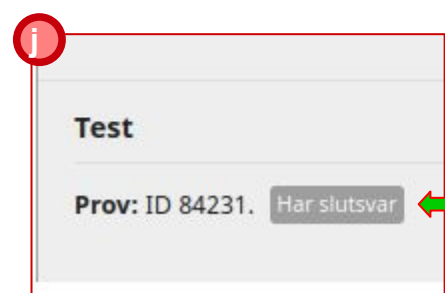

Efter analys finns analys svar i patientens journalanteckning. (Webbläsaren kan behöva uppdateras)

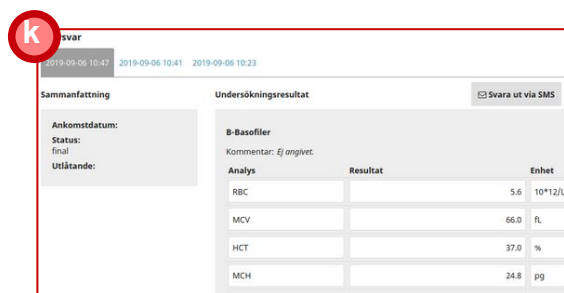

Alla provsvar som kopplas till samma LID presenteras i flikar med tidsstämpel.