


Strömsätt instrumentet

Strömsätt Plus skärmen genom att trycka på den blå strömknappen (a) och vänta till dess att Välkomstvyn visas. Strömsätt Simple Simon UA genom att trycka på den röda huvudströmbrytaren (b) på baksidan av analysmodulen. Tryck sedan på den grå "ON/OFF" knappen (c) på analysmodulens ovansida.

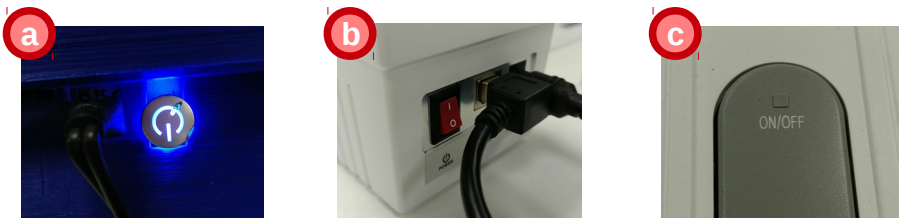


Välj analysmodul

Zafena välkomstvy (a). Använd Plus skärmens streckkodsläsare och skanna streckkoden (b) på analysmodulens ovansida. **Observera instruktionerna i Plus skärmens vy! (c)**



Utför analys

Färiska prov bör analyseras inom två timmar och nedkylda prov bör värmas till rumstemperatur (10-30°C). Doppa urinstickan ned i provet så att alla reagensfält exponeras (1). (2 sekunder) Vinkla stickan mot provkoppen för att avlägsna överflödigt prov (2). Luta kanten på stickan mot ett ludd-fritt absorberande papper för att avlägsna överflödigt prov (3).

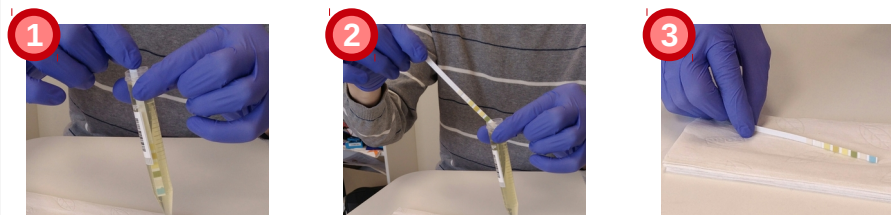


Avläs analys

Placera urinstickan på släden så nära den inre kanten som möjligt (4). Tryck sedan på "START" på ovansidan av analysmodulen (5). När analysen är klar visas resultatet (6).




Godkänn analys

Använd streckkodsläsaren för tilläggsinformation, så som Patient ID och Operatörs ID (7-8). Godkänn resultatet genom att skanna streckkoden "Godkänn & skicka in" eller ångra resultatet genom att skanna "Förkasta" (9).

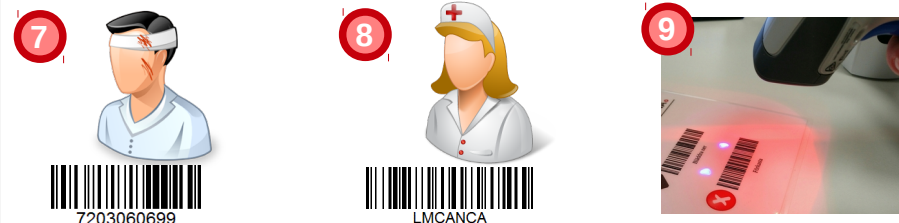

Rengöring av släden

Instrumentet ska vara strömsatt och påslaget. Använd streckodsläsaren och skanna streckoden "ZAF-CLEAN" nedan för att mata ut släden. (1) Släden matas ut helt. (2) Lyft försiktigt bort släden. (3) Skölj släden under ljummet vatten och rengör sedan med 70% isopropylalkohol eller med eget desinfektionsmedel. (4) Torka av släden med ett absorberande och ludd-fritt papper. (5) Återplacera släden utan att använda kraft. (6) Använd streckodsläsaren för att skanna "ZAF-CLEAN", så matas släden in till normal driftposition.

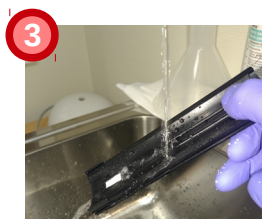

Rengöring av instrumentet

Stäng av instrumentet på "ON/OFF" knappen, så att släden förs in och stannar i instrumentet. Stäng av huvudströmbrytaren på instrumentet. Torka av instrumentet med 70% isopropylalkohol eller med eget desinfektionsmedel.



Kvalitetskontroll

Bör genomföras:

- när ny burk med urinstickor öppnas.
- vid introduktion av ny operatör.
- om regionala eller landsspecifika regler kräver det.

Fullständiga instruktioner följer med kontrollmaterialet.

Teknisk service

Har du frågor eller funderingar kring utrustningen och hur den används, vänligen kontakta oss:

Zafena AB
Norrbygatan 1
590 31 Borensberg
E-post: info@zafena.se
Telefon: 0141 405 08
Web: www.zafena.se

