

 DIALAB

DIAQUICK

Snabbtester

Fördelar

- Enkel procedur
- Pålitliga tester
- Kostnadseffektivt
- Visuella avläsningar
- Resultat inom 3 till 10 minuter
- CE-märkt.
- Alla tester innehåller kvalitetskontroll
- Singeltester i folie, god hållbarhet
- Provmaterial: Fullblod, serum, plasma, urin, saliv, faeces, halsavstryk, damm, växter o dyl.

Metoder

DIAQUICK Snabbtester finns tillgängligt som:

- Singelkassetter



- Multipanel



- Dipstick



- Spott och beröringstest



- Multikopp



Testprocedur

HighDef
bild saknas

Dipstick

Håll stickan ned i provet 10-15 sekunder. Stickan får ej stickas längre ned än markeringen, för att undvika kontakt mellan prov och testområde.
Placera stickan på ett underlag som ej är absorberande och starta klockan för senare avläsning.

HighDef
bild saknas

Singelkasset

Placera testkassetten på ett rent och plant underlag. Håll den medföljande engångspipetten vertikalt och droppa avsedd mängd i testbrunnen. Starta klockan för senare avläsning.

HighDef
bild saknas

Multipaneler

Ta av skyddshylsan på testpanelen. Doppa ned i urinprovet under 10-15 sekunder som anvisat på bilden. Placera testpanelen på ett underlag som ej är absorberande och starta klockan för senare avläsning.

HighDef
bild saknas

Multikopp

Urinprovet lämnas direkt i koppen. Därefter trycks knappen ned tills ett klick hörs. Kontrollera temperaturen 4 minuter efter provtagningen. En grön färg indikerar urinprovets temperatur. Placera koppen på ett plant underlag, och pressa nyckeln in i koppen för att starta testen. Starta klockan för senare avläsning.


HighDef
bild saknas

Salivtest

Salivprovet tas genom att föra provsamlaren in i munnen. Stryk på insidan av mun och tunga i 3 minuter för att samla upp saliv. Korken på provröret öppnas, provsamlaren pressas ordentligt ned så att saliven blandas med reagensen. Placera testkassetten/panelen på ett plant underlag.
Skruvkorken på provröret öppnas och 3 droppar tillsättes i provbrunnen. Klockan startas för senare avläsning.

Avläsning av resultat

DIAQUICK snabbtester har två olika tolkningsmöjligheter.

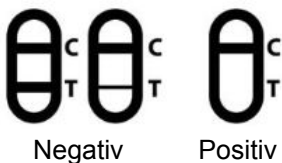

Kompetitiv metod


Negativt resultat:

Två färgade linjer är synliga. En färgad linje är synlig i kontrollzon C, och den andra i testzon T.

Positivt resultat:

En färgad linje är synlig i kontrollzon C, och ingen färgad linje i testzon T.

Alla Diaquick drogtestar har denna metod.

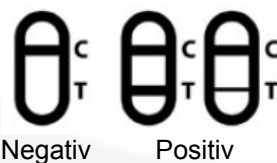

Sandwich metod

Negativt resultat:

En färgad linje är synlig i kontrollzon C, och ingen linje är synlig i testzon T.

Positivt resultat:

Två färgade linjer är synliga. En färgad linje är synlig i kontrollzon C, och den andra i testzon T.

- **Strep A Diaquick test**

Diaquick Strep A test är en kvalitativ snabbtest för påvisande av streptokock A antigen i svalgavstryksprov. Testet innehåller antikropp för Strep A för att identifiera Strep A antigenen i halsprovet. Om provet innehåller antigen från grupp A streptokocker, kommer det att ske en reaktion som ger en röd testlinje i avläsningsfältet på testkassetten. Varje kit innehåller en positiv och en negativ kontroll. Testen är SKUP-testet.



Z98223CE	Strep A Diaquick kassett	20 test
Z98230CE	Strep A Diaquick dipstick	20 test

- **FOB Diaquick test**

Snabbtest för påvisning av humant hemoglobin i faeces. Diaquick FOB är en snabb visuell immunologisk test för kvalitativ diagnostisering av humant hemoglobin i faeces. Testen är ett hjälpmedel i diagnostisering av sjukdom i nedre gastro-intestinala (g.i.) området. En enkel test som inte kräver dietrestriktioner för patienten. En snabb, hygienisk och luktfri test med hög sensitivitet och specifitet. Patienten får ett provrör med buffertlösning som tillförs lämplig mängd faeces. Provröret lämnas till läkarkontoret/lab där 2 droppar av provlösningen tillsätts i en kassett och svaret avläses efter 5 minuter. Varje kit innehåller en positiv kontroll.



Z01101CE	FOB Diaquick kassett	25 test
----------	----------------------	---------

- **Helicobacter Pylori Diaquick test**

Diaquick H.Pylori är en snabbtest för kvalitativ bestämning av IgG antikroppar mot Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller blod. Testen är ett hjälpmedel i diagnostisering av H. pylori infektion hos patienter med gastrointestinala symptom. Resultatet avläses efter 10 minuter.



Z06229CE	H.pylori Diaquick kassett, blod	30 test
Z08090CE	H.pylori Diaquick kassett, fæces	20 test
Z08091CE	H.pylori Diaquick kassett, fæces	5 test

- **Mononukleose Diaquick test**

Snabbtest för diagnostisering av mononukleosinfektion / körtelfeber genom kvalitativ påvisning av mononukleose het-erofile antikroppar i fullblod, serum eller plasma. Infektiös mononukleos / körtelfeber är förorsakat av Epstein-Barr viruset, som hör till gruppen herpesvirus. Vanliga symptom är feber, halsont och svullna lymfkörtlar. Resultatet avläses efter 5 minuter..



Z06620CE	Mononucleose Diaquick kassett	30 test
Z09630CE	Mononucleose Diaquick kassett	10 test

- **Chlamydia Diaquick test**

Snabbtest för kvalitativ påvisning av Chlamydia antigen i endocervical, urethral eller urinprov. Avläses efter 10 minuter. Chlamydia är den vanligaste veneriska sjukdomen i världen och kan leda till sterilitet, barnlöshet och kroniska underlivssmärtor.



Z98226CE	Chlamydia Diaquick test	20 test
----------	-------------------------	---------

- **hCG Diaquick test**

Snabbtest för kvalitativ påvisning av hCG i urin, med avsikt att påvisa graviditet. I en normal graviditet, kan hCG påvisas både i serum och urin så tidigt som 7 till 10 dagar efter befruktning. hCG nivån stiger snabbt och överstiger 100 IU/ml före den första uteblivna menstruationsperioden, och når en topp runt 100-200 IU/ml efter 10-12 veckor i graviditeten. Förekomst av hCG både i urin och serum kort tid efter befruktning, och den snabba ökning av koncentration tidigt i graviditeten, är en utmärkt markör för tidigt påvisande av graviditet. Testen har en sensitivitet på 25 IU/ml. Resultatet läses av efter 3 minuter.



Z98404CE	hCG Diaquick kassett	30 test
J01402-2CE	hCG Diaquick dipstick	30 test
Z01405CE	hCG combo Diaquick kassett	30 test

- **Cardiac Combo Diaquick test**

Myoglobin, CK-MB och Troponin I är proteiner som är en del av muskulaturen. Vid vävnadsskada, som ex vid hjärtinfarkt, läcker dessa proteiner ut i blodet och kan påvisas med ett blodprov. Nivån av myoglobin ökar mätbart 2-4 timmar före en hjärtinfarkt och når toppen efter 9-12 timmar, för att sedan gå tillbaka till normalnivå efter 24-36 timmar. Urskiljning av CK-MB i blodet vid infarkt kan mätas inom 3-8 timmar efter att symptom uppdagats. Den blir normal igen efter 48 – 72 timmar. Urskiljningsmönstret av Troponin I liknar CK-MB, men då CK-MB nivå stabiliserar sig efter 72 timmar förblir Troponin-nivå förhöjd i 6-10 dagar. Minimum detektionsnivå är 50 ng/mL Myoglobin, 5 ng/mL CK-MB och 1,0 ng/mL Troponin I. Avläses visuellt efter 10 minuter..



Z08233CE	Cardiac Combo Diaquick kassett	5 test
----------	--------------------------------	--------

- **Drugtester Diaquick**

Drogtester Diaquick finns som singel test och multiparameter för kvalitativ detektion av diverse droger och/eller metaboliter i humant urin och saliv. Översikt Drog: **AMP**-Amfetamin, **BAR** - Barbiturater, **BZO** - Benzodiazepiner, **BUP** - Buprenorfin, **COC** - Kokain, **THC** - Marihuana, **MDMA** - Exstasy, **MET** - Metadon, **MET** - Metamfetamin, **MOR** - Morfin, **OPI** - Opiater, **OXY** - Oxycodon, **PCP** - Pencyklidiner, **PPX** - Propoksyphen, **TCA** - Tricykliske Antidepressiva. Som standardsortiment lagerhåller Handelshuset Medic en multipanel med 6 parametrar, en multikopp med 6 parametrar samt en ADU test för upptäckt av manipulerade prov..

Z98907CE	Multi-6 Drug panel Diaquick - MTD, MET, BZO, COC, MOP, THC	30 test
Z04590CE	ADU Diaquick test - Creat, Ni, Glut, pH, SG, Ox	50 test
Z06667CE	Multi -6 Drug kopp - AMP, MET, BZO, COC, MOP, THC	1 test
Z07608CE	Multi- 5 Drug panel Diaquick - AMP-BZO, COC, THC, MOP	10 test



ZA



ZAFENA AB
Norrbygatan 1
591 76 Borensberg

www.zafena.se
+46 141 405 08
info@zafena.se

