

Förebyggande underhåll av Simple Simon PT Plus

Beskrivning

Dokumentet beskriver hur Simple Simon PT Plus underhålls.

Rengöring av PK/INR mätare

Torka av med desinfektionslapp, eller en trasa/duk, lätt fuktad med desinfektionsmedel och/eller isopropyl alkohol.

Efter avtorkning kan mätaren lufttorkas eller torkas av med en torr ludd-fri trasa.

Rengör strålgången med en bomulls-tops, lätt fuktad med desinfektionsmedel och/eller isopropyl alkohol.

Använd en torr bomulls-tops för att torka torrt i strålgången.

Använd inte medel som innehåller blekmedel eller Klorin, då dessa sliter på ytan. Mätaren får ej dränkas eller sköljas i rengöringsmedel, då vätska kan leta sig in och påverka elektroniken.

Rengöring av Plus-skärm (IT-del)

Torka av med desinfektionslapp, eller en trasa/duk, lätt fuktad med desinfektionsmedel och/eller isopropyl alkohol.

Efter avtorkning kan Plus-skärmen lufttorkas eller torkas av med en torr trasa.

Använd inte medel som innehåller blekmedel eller Klorin, då dessa sliter på ytan. Mätaren får ej dränkas eller sköljas i rengöringsmedel, då vätska kan leta sig in och påverka elektroniken.

Rekommendationer

Ytlig avtorkning av mätaren bör göras en gång om dagen.

Rengöring av strålgång bör utföras en gång per månad och/eller vid synlig smutts.

Ytlig avtorkning av Plus-skärmen bör göras en gång i veckan.