

Approved by:	Version: 20230613	
Date:	Author: FW	Page 1 by 3

Scil vCell5

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker via kabelanslutet nätverk.



Nödvändiga delar

1. 1 x ZAF-520-16 (7-port powered USB-hub)
2. 1 x ZAF-520-14 (USB to Ethernet adapter)
3. 2 x ZAF-509 (Network cable)
4. 1 x ZAF-520-15 (5-port ethernet switch)

- A. Anslut ZAF-520-16 (USB-hub) till ett strömuttag och sedan dess anslutningskabel till ett av POC-Workstation fyra USB-portar.
- B. Anslut ZAF-520-14 (USB to Ethernet) till ett av USB-portarna på USB-hubben.
OBS! Detta förutsätter att POC-Workstation redan är på och ansluten till ett nätverk via kabel eller wifi.
- C. Anslut ZAF-509 (Nätverkskabel) i ZAF-520-14 (USB to Ethernet)
- D. Anslut ZAF-509 (Nätverkskabel) i nätverksuttaget på baksidan av Scil vCell5 instrumentet.
- E. Anslut ström till ZAF-520-15 (5-port switch) och anslut båda ZAF-509 (Nätverkskabel) till switchen.

Intrument-tag: LMC-SVC1

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.




LMC-SVC1


Approved by:	Version: 20230613	
Date:	Author: FW	Page 2 by 3

Inställningar på instrument


1. Tryck på det lilla kugghjulet längs ned till vänster på skärmen. "Settings"

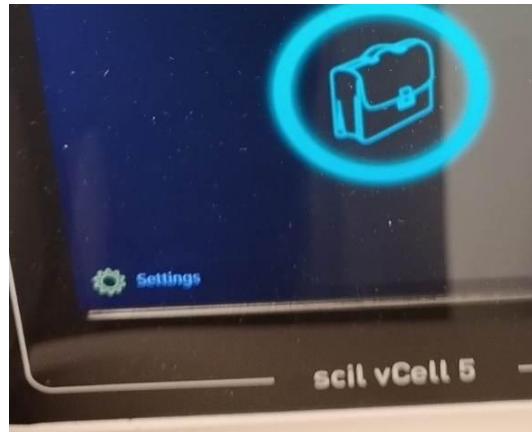

2. Välj "System Settings"

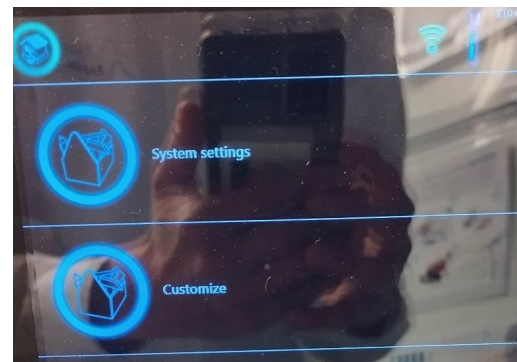


3. Bläddra fram till "Network setup"
DHCP ska vara aktiverad.
Här kan man sedan se om instrumentet får IP-adress av POC-Workstation i serien:
IP: 172.16.1.XXX
Subnet: 255.255.240.0
Gateway: 172.16.1.1

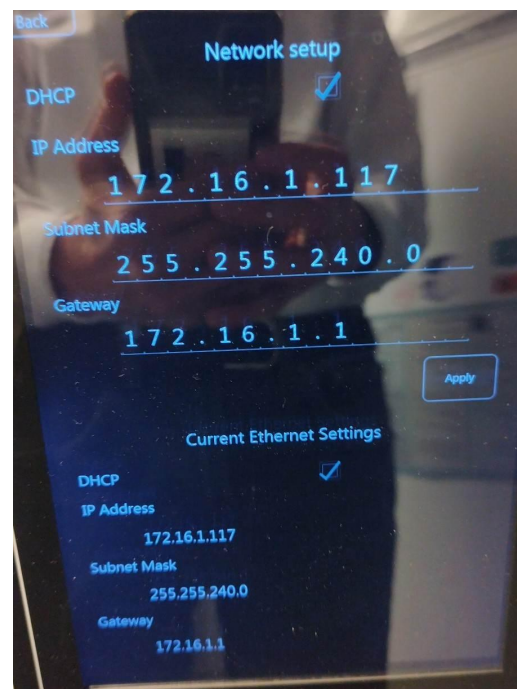

Approved by:	Version: 20230613
Date:	Author: FW Page 3 by 3

- Bläddra fram till "LIS" och ställ in enligt följande:
LIS IP: **172.16.1.1**
LIS port: **21110**
LIS timeout: **30**
Auto LIS transmission: **ON**
Repeat Sample ID as Patient ID: **OFF**
Keep alive LIS connection: **OFF**
LIS message version: **ASTM 1.1**
Local LIS server enabled: **OFF**

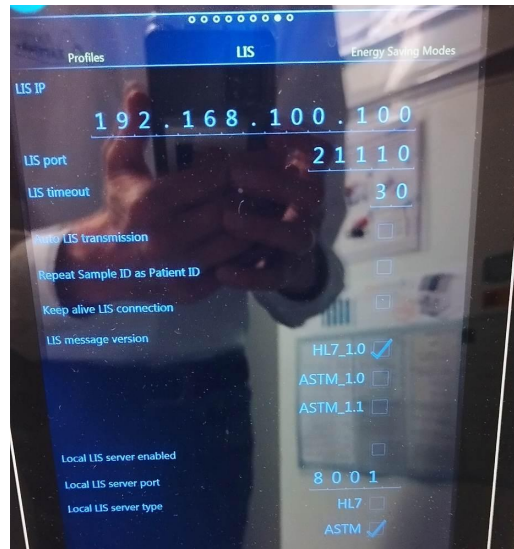

Skicka en gammal körning från instrumentets minne:

- Från huvudmenyn väljer du "**Results**"
- Tryck dig fram till resultaten.
- Välj ett resultat genom att markera resultatet med en bock.
- Tryck på den lilla ikonen längst nere till höger på skärmen.
- Tryck på ikonen "**LIS**"

