
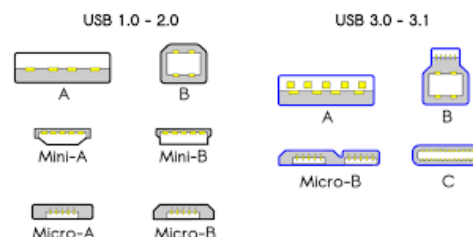


Approved by:	Version: 20220929	
Date:	Author: FW	Page 1 by 3

## Siemens Clinitek Status Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker med USB2.0, USB Type A till RS232 Serial.

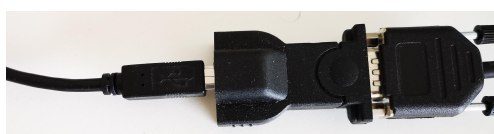

Delar som behövs:

Produkt	Produktnummer
- POC-Workstation	ZAF-552
- Serial Kabel f/f	ZAF-520-12
- RS232 to USB (Alt.1)	ZAF-520-1
- USB-B to USB-A kabel	ZAF-520-3

Anslut kommunikations kabeln [ZAF-520-12] till uttaget för RS232 på baksidan av mätaren.

Den andra änden ansluts till konverterare [ZAF-520-1]. Från denna ansluts en USB-kabel [ZAF-520-3] till POC-Workstation.



## Instrument-tag: LMC-BCS1

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.  
Följ sedan dokumentationen "Snabbguide - Arbetsflöde" för att utföra analys och skicka in resultat till journalsystemet.




Approved by:	Version: 20220929
Date:	Author: FW <span style="float: right;">Page 2 by 3</span>

## Inställningar på instrument


1. Tryck på "Instrument-inställning"  
Om enheten har lösenordsskydd, så skriver du in rätt lösenord. Fråga klinikens personal om lösenordet.



2. Välj "Instrumentinställningar"

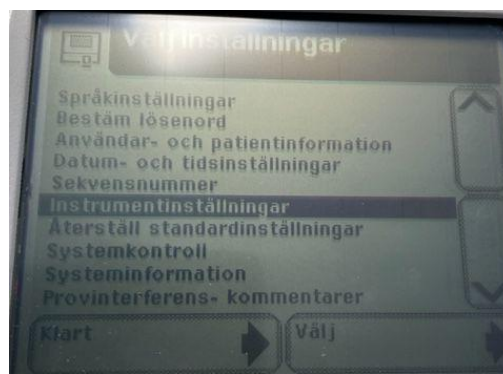


3. Välj "Serieanslutning"  
Tryck sedan på "Redigera serieanslutningar"

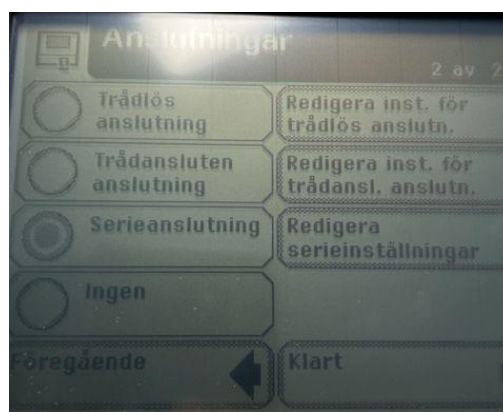


Approved by:	Version: 20220929
Date:	Author: FW <span style="float: right;">Page 3 by 3</span>

4. Sätt Baudhastighet till "9600"  
Tryck tryck sedan på knappen  
"Nästa"

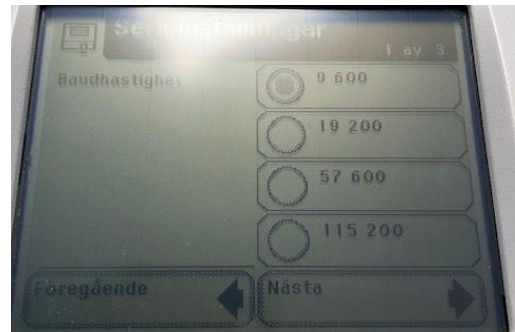


5. Pia: Här saknar du en bild.. Bilden ovan är 1 av 3 och den under är 3 av 3.

6. Välj Stopp-bit:  
"1"  
Tryck på "Klart"

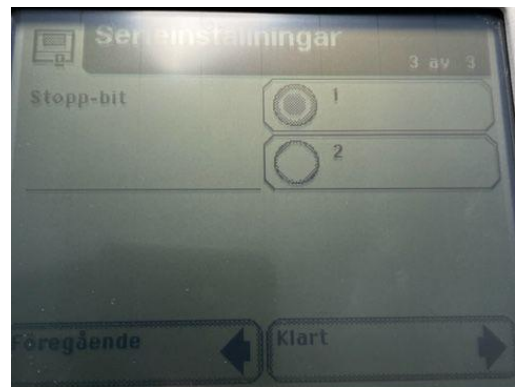

7. Gå in under alternativet  
"Anslutningar"  
Stäng av eventuell  
"anslutningsplattform" genom att  
välja "Avstängt"

Aktivera automatisk överföring  
genom att välja "Aktiverat" för  
alternativ "Skicka resultat  
automatiskt till  
laboratorieinformationssystem"

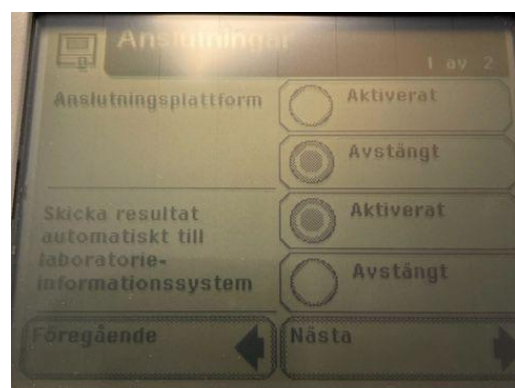

Pia: Här saknar du en bild till.. Bilden ovan är 1 av 2

Starta om instrumentet och kontrollera att inställningarna är sparade.